

# Ace en Button (Keyhole) Dressings

## Gebruikers instructie

Medicina dressings zijn gemaakt van een silicone gel materiaal. Deze dressings zijn ontworpen ter bescherming en fixatie van stoma producten. De "keyhole" dressings zijn bijzonder geschikt voor de gevoelige uitgang van iedere in het lichaam aangebrachte catheter, zoals bij een gastrostomy catheter. De dressings bevatten geen kleefstoffen maar ze plakken aan de huid door de natuurlijke kleefkracht van het gel materiaal. Dit heeft als voordeel dat de dressings makkelijker en prettiger te verwijderen zijn zonder lijmresten op de huid achter te laten. Hierdoor is het soms lastig de dressing van de beschermfolie te verwijderen. Deze verwijdert u het gemakkelijkst voorzichtig vanaf de zijkanten naar het midden toe. Als de dressing erg plakkerig aan de randen is kan dit worden verholpen door een klein beetje ongeparfumeerde talkpoeder op de rand te wrijven.

### *Ace dressing*

Deze dressing is specifiek ontworpen om de Ace Stopper te beschermen en te fixeren. De dressings dienen iedere 24 uur vervangen te worden en zijn verpakt per 30 stuks in een doos.

### *Keyhole dressing*

Deze dressing is speciaal geschikt voor *buttons* met een afmeting van 10-18 FR. Nadat de beschermfolie is verwijderd kan de dressing voorzichtig met behulp van de doorsnede en het "sleutelgat" in positie worden gebracht. Daarna de dressing zacht op de huid vastdrukken. De dressings dienen iedere 24 uur te worden vervangen en zijn verpakt per 30 stuks in een doos.

De dressings kunnen tijdelijk verlichting bezorgen bij een gevoelige uitgang door lekkage van gastrische inhoud of over-grannulatie. Hoewel de dressing verlichting biedt is het wel noodzakelijk de oorzaak te onderzoeken.

### Waarschuwing

Indien er roodheid van de huid en/of uitslag onder de dressing ontstaat dient u dit product niet langer te gebruiken. Dit komt echter zelden voor en de dressings worden normaal gesproken zeer goed verdragen.