

Benodigdheden voor klaarmaken Pegasus Vario pomp

- Pegabag 50 ml
- Pumphead Pega
- Double male luerlock
- BacterieFilter
- Pegaline 100 SF

- Tegaderm
- Steriel gaas 10 x 10 cm
- Steriele handschoenen
- Chloorhexidine
- Controlelijst

Het voorbereiden van pomp


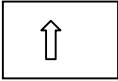
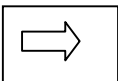
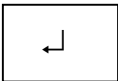

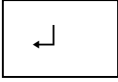
- Plaats de pomp met het display naar boven op de vlakke ondergrond.
- Buig de zijklemmen naar buiten, haal de bovenkant voorzichtig los en draai het display gedeelte naar beneden.
- Open het achterste deel van de pomp.
- Druk het pomphoofd voorzichtig in het geleide zodat deze exact past.
- Sluit het pompkastje.
- Verbindt de Luer-connecties.
- Plaats het reservoir in de reservoirhouder en schuif deze zijwaarts op de pomp.

Het instellen van de pomp




Code ...

Met behulp van de code komt u in het startmenu. In het display verschijnen de aanwijzingen die kunnen worden opgevolgd om de pomp naar wens in te stellen. De oplichtende cursor geeft aan welke parameter kan worden ingegeven.

1. Er kan in ml of mg eenheden gewerkt worden.
2. Met de **numerieke** toets ↑, de **volgende** toets → en de **enter/save** toets ↵ kunnen de bestaande waarden gewijzigd worden.
3. Tevens kan een extra hoeveelheid medicijn ('bolus') worden toegediend via programmering of handmatig middels de **bolus/special** ☆ toets.
4. Gegevens worden bevestigd en opgeslagen d.m.v. de **enter/save** toets ↵. In het menu kunt u terug vinden;
 - toevoersnelheid
 - inhoud van het medicijnzakje
 - voor hoeveel tijd er nog medicatievloeistof aanwezig is
 - bolushoeveelheid en bolus pauzetijd
 - data en tijdstip van gegeven en geweigerde bolussen
5. De groene signaallamp verschijnt met regelmatige tussenpozen terwijl de pomp werkt. Wanneer er een willekeurige toets wordt ingedrukt zal het achtergrondlicht gaan branden en het informatiemenu zich openen.
6. 2 uur voor het opraken van de inhoud van het reservoir zal het display de resterende tijd aangeven tot het reservoir leeg is.
7. De batterij kan in de pomp blijven ook wanneer de pomp gestopt is, pomp gaat in slaapstand en verbruikt praktisch geen stroom.

symbool	Functie
	Bolus knop; voor het geven van de bolus en Speciale knop – om catheter te primen - om te starten na de korte stop
	Volg het pijltje om parameters te selecteren
	Pijltje voor het volgende display <ul style="list-style-type: none"> • informatie en/ of set-up menu • om volgende parameter te selecteren • om informatiemenu door te lopen
	Enter/ save toets: om te veranderen: bewaren of verwijderen van de gegevens of om de code te bevestigen
 + 	Noodstop: het tegelijk indrukken van beide toetsen zorgt er voor dat de pomp stopt

Problemen oplossen

Alarmsymbool in de display	oorzaak	Wat te doen
	Batterij is leeg	Vervang de batterij onmiddellijk
	Batterij is bijna leeg. De batterij capaciteit is nog ongeveer 20 %	Vervang de batterij
	De batterij is leeg de infusie kan ieder moment stoppen	Vervang de batterij, alle gegevens blijven bewaard. Na vervanging van de batterijen gaat de pomp automatisch verder
	Medicatie-reservoir is leeg.	Vervang het reservoir.
	Occlusie aan de kant van de patient. De druksensor herkent de occlusie van het infuussysteem aan de drukverhoging in de infuuslijn. Het infuussysteem is geknikt of niet meer doorgankelijk	Controleer het infuussysteem en herstel de knik. Indien nodig vervang het infuussysteem
	Er is een fout in het pomphoofd	Vervang het pomphoofd
	Voor de infusie: Het pomphoofd is niet goed in de houder geplaatst, of het pomphoofd is niet geplaatst Voor de gegevens invoering: (is geen pomphoofd nodig)	Plaats het pomphoofd op de juiste manier in de pomp, verwijder de rode vleugels en sluit de deksel van de pomp.  Druk de toets  En dan  Verwijder de batterijen voor 2 sec. En herplaats deze.
	De accu van de pomp is leeg.	Stuur de pomp terug naar de leverancier.

Blanco scherm	Batterijen zijn leeg	Vervang de batterijen
	Frequentie fouten in de pomp	Stuur de pomp terug naar de leverancier voor service.
	Technisch pomprobleem	Stuur de pomp terug naar de leverancier voor service.
	Technisch pomprobleem	Verwijder de batterijen en Plaats nieuwe. De pomp zal automatisch herstarten. Als de fout zich herhaalt, stuur dan de pomp retour naar de leverancier voor service
	Pomphoofd is beschadigd	Vervang het pomphoofd, ontlucht het systeem en start de pomp opnieuw
	In het programmeringmenu - gedurende 60 minuten is er geen toets ingedrukt - de batterijen zijn verwijderd	Controleer en zonodig opnieuw programmeren
Fout in code	Interne pomprobleem	Geen infusie. Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw. Als de fout zich herhaalt, stuur dan de pomp naar de leverancier retour voor een servicebeurt
	De pomp staat uit	Start de pomp opnieuw en toets de code in om in het programma te komen.