

Signomat S2 Etsapparaat

Apparaat is voorzien van:

Voorzijde:

Lamp geel voor in gebruik
Lamp groen voor etsen licht of donker
Draaiknop voor instellen etstijd
Rode connector voor aansluiting aarde kabel
Zwarte connector voor aansluiting van etsstempel



Achterzijde:

Aan / Uit knop
Stekker voor stroomingang.

Bijgeleverd:

Stroomkabel
Aardekabel
Stempelkabel
Stempel
Gebruiksaanwijzing, Duits, Engels & Frans, verkorte Nederlandse

Verkorte Handleiding

- Draag altijd handschoenen en eventueel een beschermbril, Elektrolyt en Neutralyt bij contact in de ogen direct met water uitspoelen.
- Laat stempel niet op contactplaat liggen.
- Niets eten of drinken tijdens het etsen.
- Was na gebruik zorgvuldig uw handen.
- Plaats de Signomat in een droge ruimte.
- Kijk of de juiste netspanning klopt.



- Druk op knop "on" aan de achterzijde, het gele lampje gaat branden.
- Gebruik de drukknop om licht of donker te etsen, groen lampje van de voorkeur brand.
- Plaats het stempel in de stempelkabel en plaats deze kabel in de zwarte connector.
- Bevochtig het stempel met Elektrolyt.
- Stel de Etsijd in doormiddel van de draaiknop (gemiddeld is 5-6 sec)
- Leg te etsen voorwerp op de contactplaat, doe het sjabloon erop op de door u gewenste plaats en druk nu het stempel op de sjabloon.
- U hoort een tik, dit geeft aan dat er contact is, hoort u geen tik, dan het instrument opnieuw op de plaat leggen.
- Als het etsen klaar is hoort u opnieuw een tik, dit is gelijk aan de door u ingestelde tijd.
- Haal het stempel omhoog (niet op de contactplaat leggen)en verwijder het sjabloon.
- Doek wat Neutralyt op een doekje en neem hiermee de etsing af.
- De sjabloon is weer opnieuw te gebruiken.

Bij grotere sjablonen het stempel langzaam van links naar rechts verplaatsen, of een breder stempel aanschaffen.

Voorzichtig met gebruik van Elektrolyt; bij morsen direct met vochtige doek schoonmaken.

Veel succes met het gebruik van de Signomat!!

CW-L300 Label- en CD/DVD Printer

Apparaat wordt geleverd met:



Software voor Windows® en USB kabel.
Software CD (FA-B30) voor Windows®

Specificaties CW-L300:

- LC-Display 12 kolommen / 4 regels
- Bekijk het label vóór het printen.
- Tot 8 print-regels
- Print-type: Thermale transfer 200dpi
- 5 taalkeuze's
- 7 verschillende bar-codes; EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ITF, CODE39, CODABAR.
- Label tape's in 5 breedtes verkrijgbaar: 6, 9, 12, 18 en 24 mm.
ETS tape alleen in 24 mm!
- 13 kleuren tape verkrijgbaar.
- 5 fonts + extra klein font (1.5 mm)
- "Copy and Paste" functie
- Tape lengte programmeerbaar.
- Auto-uitlijnfunctie (Auto-Fit-Printing)
- Opslagcapaciteit voor 2000 symbolen
- Gebruikersfunctie om uw eigen tekeningen, symbolen of pictogrammen te maken.

Verkorte gebruiksaanwijzing

Uw printer startklaar maken:

- Verbind het netsnoer met de printer, en steek de stekker in het stopcontact.
- Zet de printer aan door op de blauwe "On" knop te drukken
Er is reeds door uw leverancier een tape (gekleurd) geplaatst zodat u kunt testen.
- Om de taalkeuze te wijzigen, drukt u op "function" en "phrase Memory" en kies uw taalkeuze door de cursortoetsen ◀▶ te gebruiken, en te bevestigen met "set".
- Kies, in het hoofdmenu, "tape" met de cursortoetsen ◀▶ en bevestig uw keuze met "set".
- Nu, in het submenu "tape", heeft u de keuzemogelijkheid tussen "new" en "saved files". Kies de gewenste optie met de cursortoetsen ◀▶ en bevestig keuze met "set"

Opgeslagen bestanden activeren:

- Er zijn reeds twee modellen geïnstalleerd;
Model V01 Font: sans serif 1,50 mm; Uitlijning: centraal op display. "small font" is zichtbaar aan de rechterzijde.
Model V02 Font: sans serif 2,20 mm; Uitlijning: centraal
- Maak een keuze tussen de modellen met de cursortoetsen ▲▼ en bevestig met "set"
- Gebruik cursortoets ▼ om "ingabe" te selecteren en verwijder de bestaande tekst met "DEL". Vervang de tekst door uw nieuwe tekst.
- Bevestig de ingevoerde tekst met "print"
- De al geïnstalleerde modellen staan op "1 copy" en "half cut". Deze instellingen kunt u wijzigen. Bijvoorbeeld; als u 3 enkele prints van dezelfde tekst wilt, wijzig naar "3 copies" en "full cut". Druk nogmaals op print.

Eigen labels ontwerpen:

- Zet de printer aan door op de blauwe "On" knop te drukken.
- Bevestig keuze "tape" in het hoofdmenu met "set".
- Bevestig keuze "new" in het tape menu met "set".
- Bevestig keuze "free design" in het tape menu met "set"
- Indien gewenst kan de teksthogte worden gewijzigd door "size" in te drukken. Kies vervolgens "Character" met behulp van de cursortoetsen ▲▼ en bevestig keuze met "set".
- Voer de gewenste font grootte in. De font grootte kan worden aangepast in hoogte en breedte van 1 – 5. Bevestig keuze met "set".
- Voer de gewenste tekst in.
- Bevestig de keuze met "print".
- De al geïnstalleerde modellen staan op "1 copy" en "half cut". Deze instellingen kunt u wijzigen. Bijvoorbeeld; als u 3 enkele prints van dezelfde tekst wilt, wijzig naar "3 copies" en "full cut". Druk nogmaals op print.
- Het label wordt nu geprint

U kunt alle settings wijzigen / veranderen met behulp van de cursortoetsen ◀▶ ▲▼ en uw keuze te bevestigen met "set".

De printer op uw PC aansluiten:

Voordat u de software installeert, dienen alle gebruikers programma's en anti-virus programma's te zijn afgesloten.

Verder dient Adobe reader 6.0 (of hoger) te zijn geïnstalleerd. Wij raden Adobe reader 7.0 aan; deze versie kunt u downloaden van het internet.

Lees en volg de installatie instructies aandachtig om een onjuiste werking te voorkomen.

Snel zoeken / handige tips:

- Richtlijn – ontwerp het Disk label, handleiding op blz. 8
- Richtlijn – ontwerp een tape label, handleiding op blz. 16
- Formaat van tekstregels specificeren, handleiding blz. 33
- Tape modellen en typen, handleiding blz. 38 – 40
- Het openen, save en deleten van labels, handleiding blz. 54
- De printer set-up configureren, handleiding blz. 55
- Probleem oplossen, handleiding blz. 59 – 67
- Disk label formats en nummer formats, handleiding blz 70 – 73
- Indien gewenst kunt u teksten wijzigen door gebruik te maken van "font", "size", "style", "form", "frame", "illust" en "symbol". Voor de individuele omschrijvingen, zie de handleiding blz. 50 -53 en 68 – 69.

Conversie punt naar mm

Karakter grootte van CW-L300 in mm

1x1 = 2.2 mm

2x2 = 4.5 mm

3x3 = 6.7 mm

4x4 = 9.0 mm

5x5 = 11.2 mm

Voor meer informatie zie bijgeleverde handleiding. Heeft u nog vragen bel dan onze afdeling Customer Service 0321 317 725.