



## UROX

### Introductie

Een nieuw urine opvangsysteem gemaakt voor actieve en extroverte mannen die last hebben van vaak (ongewild) moeten plassen of incontinent zijn.

Het systeem zorgt ervoor dat gebruikers gewoon door kunnen gaan met hun levensstijl ondanks dat men last heeft van het probleem dat men (ongewild) vaak moeten plassen.

UROX is eenvoudig aan te brengen en te verwijderen. Bij normaal gebruik kunt u het meerdere keren gebruiken, waardoor u de kosten in de hand kunt houden.



Agenda:

- ◎ Product kenmerken & Design
- ◎ Gebruiksaanwijzing
- ◎ Wanneer en waar kunt u UROX gebruiken
- ◎ Patiënten

## Product kenmerken:

Het UROX systeem bestaat uit de volgende onderdelen:

- Cup
- Legging met urinezak
- Fixatiebroek
- Onderhoudsvloeistof

## De UROX cup

- Silicone membraam in 4 maten
- One-size PVC Cup
- 50 cm kwaliteits PVC tube
- Knikt niet af
- Zacht en plooibaar
- Kan tot 29 keer/dagen hergebruikt indien goed gespoeld wordt .



## UROX legging



- ⦿ Vorm zich goed om het been en heeft een sportieve look
- ⦿ PVC zak heeft een capaciteit van 600 ml en heeft een anti reflux klep
- ⦿ Te verkrijgen in 4 maten
- ⦿ Voorzien van een velcroband dat aangetrokken kan worden als de zak vol is.
- ⦿ Het kraantje zit discreet en veilig op de zak en voorkomt het nadruppen in uw schoenen nadat u hem heeft geleegd.
- ⦿ Kan 7 dagen gebruikt worden als u er voorzichtig mee omgaat



## UROX fixatiebroek

- Gemaakt van 95% katoen en 5% spandex.
- Zeer comfortabel.
- Te verkrijgen in 5 maten
- Zorgt ervoor dat de cup op zijn plaats blijft en dat de tube recht blijft.
- Geen naden op de achterkant, daardoor zeer geschikt voor rolstoelgebruikers

## UROX onderhoudsvloeistof

Gaat bacteriële groei en kolonisatie tegen waardoor je controle houdt over de geur en de hygiëne.

In de lies zit een hoge concentratie van de patiënt zijn eigen bacteriën. Als alleen de cup gedesinfecteerd zou worden, zou deze binnen enkele minuten weer geïnfecteerd raken.



# Gebruiksaanwijzing

Aantrekken en bevestigen van de UROX



- Het legen en schoonmaken



## Gebruik & Design

- Wanneer wel UROX en wanneer niet UROX
- Design en communication philosophy

## Wanneer wel UROX

- ◎ UROX werkt en wordt gewaardeerd door:
  - Actieve mannen die kunnen werken met UROX
  - Vooral voor die mannen die hun leven niet willen laten lijden door, het constant moeten zoeken naar een toilet, luiers of een natte broek.



## Wanneer gebruik je UROX

- ⦿ UROX werkt al zittend, staand, lopend, rennend en fietsend.
- ⦿ Overal daar waar het moeilijk is om een toilet binnen 2-3 minuten te vinden .
- ⦿ Net als water, stroomt urine alleen naar beneden en is dus niet geschikt voor bedlegerige patiënten.

## Wanneer geen UROX

- ◎ Gebruik de UROX niet in het geval van :
  - Bedlegerig
  - Alzheimer patiënten
  - Een terug getrokken of kleine penis
  - Patiënten met schommelingen van het gewicht
  - Verhoogde urinelozing in de nacht
  - Kinderen
  - Gezonde mannen





## UROX – Design concept

- ◎ Sportief design – UROX is uniek
- ◎ UROX is ontworpen voor mannen.
- ◎ Veilig, gemakkelijk, discreet en mannelijk



## Patiënten:

- De patiënten groepen die er baat bij hebben om de UROX te gebruiken

## Invloed van plas problemen:

- ⊙ De helft van alle mannen van 60+ wordt gehinderd door plas problemen
- ⊙ 70-80% is prostaat gerelateerd
- ⊙ De meeste van deze mannen zijn niet officieel geregistreerd

## De belangrijkste patiënten groep

- ⊙ Zelf - Care
  - ⊙ Voor behandeling van prostaat kanker en vergrote prostaat (BHP – Benign Hypertrofia Prostate)
  - ⊙ Incontinentie
  
- ⊙ Prof - Care
  - ⊙ Na behandeling van BHP en prostaat kanker
  - ⊙ Ruggemerg verwonding
  - ⊙ Multiple Sclerosis
  - ⊙ Spina Bifida
  - ⊙ Beroerte
  - ⊙ Gediagnoseerde incontinentie



## BHP patiënten :

- De klachten bij het BHP probleem zijn zeer uiteenlopend. Klachten passend bij dit beeld zijn: moeilijk op gang komen bij het plassen, slappe straal, vaak moeten plassen, niet helemaal leeg kunnen plassen, na het plassen opeens nog een keer moeten en er 's nachts vaak uit moeten om te plassen.
- De spiertjes (gladspierweefsel) van de prostaat zijn er de oorzaak van dat bij BHP de urinebuis dicht wordt geknepen. De blaaswand zal dikker worden, waardoor men de blaas niet goed meer kan legen.
- De consequentie is dat het actieve volume van de blaas is gereduceerd en dat de patiënt lijdt aan vaak moeten plassen.

# Transurethrale resectie van de prostaat

- Bijna alle patiënten ervaren de eerste twee maanden na de prostaat operatie problemen als nadruppelen of lekken.
- Menigeen heeft een chronische incontinentie na behandeling aan prostaat kanker, vooral als de tumor zich uitstrekt tot in de sluitspier en na een radicale prostectomie
  - 45 % zijn incontinent na de operatie
  - 22% na bestraling
  - 15% na een combinatie van hormoon behandeling en bestraling
- Het aantal gevallen van prostaat kanker stijgt. In de EU is de verwachting dat ca. 1 ‰ van de mannen prostaat kanker krijgt.

## Neurologische patiënt

- ⊙ Incontinentie bij neurologische etiologie
  - ⊙ Ruggemerg verwondingen
  - ⊙ Multiple Sclerosis
  - ⊙ Spina Bifida
  - ⊙ Beroerte & hersen beschadiging
- Als de zenuwen beschadigd zijn, voelt de patiënt niet als de blaas vol is, noch heeft hij controle op het lozen van de urine.
- Menigeen leegt de blaas door regelmatige zelf catheterisatie, maar hebben geen controle over hun blaas.
- UROX bied zekerheid bij reizen werken of in de thuis situatie .



# **Bedankt voor uw aandacht**

Eurosteriel Medical

De Aar 61

8253 PN Dronten

Tel: +31 321 317725

Fax: +31 321 318125

[www.eurosteriel-medical.nl](http://www.eurosteriel-medical.nl)

info@eurosteriel-medical.nl