



Catheter Securement

Grip-Lok 3600LJCVC is een toepassing die speciaal ontwikkeld is voor het fixeren van een infuus rondom de halsader.

Grip-Lok 3600LJCVC is sterk genoeg om een infuus op de juiste plek te houden en door de veelzijdigheid van dit product voor bijna elke patiënt te gebruiken. De 3600LJCVC bevat een brede plakstrook en hierdoor blijft het infuus gemaakt van zowel siliconen en andere plastic componenten goed vastzitten.

- Zachte en flexibele design verbetert comfort van patiënten.
- Grip-Lok is zowel horizontaal als verticaal toe te passen.
- Makkelijk in gebruik, in controle en aan te passen.
- Ademend en latex-vrij om de risico's op een allergische reactie en huidirritaties te verminderen.

Bereid de huid voor volgens het standaard ziekenhuis protocol betreffende het aanbrengen van hulpmiddelen. Verwijder eventueel huidschilfers of haar voor het optimaliseren van de kleefkracht.



1. Open de plakstrip en schuif de Grip-Lok onder de hub. Zorg ervoor dat de hub zich in het midden van de plakstrip bevindt.



2. Verwijder de binnenste strip waardoor de plakstrip zichtbaar wordt.



3. Druk de hub stevig aan op de plakstrip. Centreer de hub, zodat aan beide zijde genoeg ruimte beschikbaar is



4. Bevestig de bovenste strook over de katheter en druk de plakstrip aan beide zijdes goed aan.



Grip-Lok 3600LJCVC is een toepassing die speciaal ontwikkeld is voor het fixeren van een infuus rondom de halsader